


# Browne TST Control™ Indikatoren zur Zyklusverifizierung (Emulierende Indikatoren)

Indikatoren der Klasse 6 liefern  
Ihnen den 'In-Pack'-Nachweis  
für einen erfolgreichen  
Sterilisationszyklus

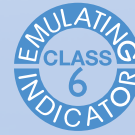


Sterility Assurance Products  
World Class and Globally Trusted

Ein umfassendes Angebot von  
Indikatoren zur Sterilisationszyklus-  
Verifizierung deckt alle Ihre  
Anforderungen ab.

Die Browne TST Control Indikatoren zur  
Zyklusverifizierung sind für die spezifischen  
Zyklusparameter Ihres Sterilisators kalibriert  
und wurden von unabhängiger Stelle nach den  
Leistungskriterien der ISO 11140-1:2005, Klasse 6,  
geprüft.

Innerhalb der Siebe, Packungen oder Beutel  
plaziert, liefern die TST Control Indikatoren zur  
Zyklusverifizierung eine klare optische Bestätigung,  
dass der Inhalt allen für die zuverlässige Sterilisation  
erforderlichen kritischen Parametern ausgesetzt  
wurde.

Als einfache oder selbstklebende Indikatoren,  
als Duplex- oder mehrteilige Etiketten lieferbar,  
unterstützt die Produktpalette TST Control die  
herkömmlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen  
und stellt eine abschließende Prüfung vor dem  
Medizinprodukteinsatz dar.

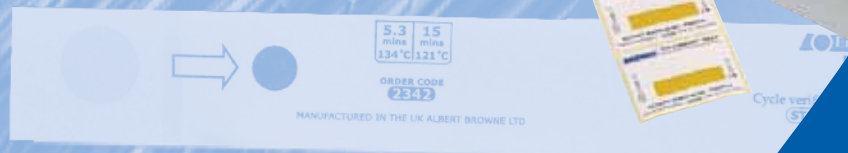

STERIS®



## Einfache und effektive Dokumentation

Dank Ihrer einzigartigen, intelligenten Tintentechnologie stellen die 'Duplex-' und 'mehnteiligen' Etiketten der Browne TST Control Indikatoren zur Zyklusverifizierung einen direkten Bezug zwischen dem Patienten, den Medizinprodukten und dem In-Pack-Nachweis des wirksamen Sterilisationszyklus her.

Das mit allen manuellen Rückverfolgbarkeitssystemen kompatible Browne TST Control Duplex-Etikett ist ideal für den Einsatz in Kliniken oder Arztpraxen geeignet, die Kleinststerilisatoren verwenden. Bei der Vorbereitung und Verpackung können entsprechende Informationen über das Sieb oder die Verpackungen auf das Etikett geschrieben werden.

Das mehrenteilige Browne TST Control Multi-Part-Etikett ist mit den meisten computergestützten Rückverfolgbarkeitssystemen kompatibel. Der linke Teil ist mit einem Prozessindikator der Klasse 1 bedruckt; der rechte Teil enthält einen Indikator zur Zyklusverifizierung der Klasse 6. Bei der Verpackung werden auf beiden Teilen Verpackungsdaten

im Strichcode-Format des vorhandenen computergestützten Rückverfolgbarkeitssystems aufgedruckt. Dann wird der rechte Teil in der Verpackung plaziert und der linke Teil in üblicher Weise an der Außenseite der Verpackung angebracht.

Bei der Anwendung werden die Indikator-Etiketten von dem Sieb, der Packung oder dem Beutel entnommen und der Patientenakte als Nachweis für die Erreichung aller für die Sterilisation erforderlichen kritischen Parameter beigefügt.

## Auswertung der Testergebnisse

Beispielhafte Darstellung. Tatsächliche Ergebnisse können davon abweichen.



## Leistung

- > ISO 11140-1 Indikator der Klasse 6
- > ISO 11140-1 KONFORM
- > Frei von Blei und sonstigen Schwermetallen
- > Farbumschlag von hellgelb nach dunkelblau/violett

## Vorteile

- > Kalibriert für die spezifischen Zyklusparameter Ihres Sterilisators
- > Unabhängig nach den Leistungskriterien der ISO11140-1 getestet; daher zuverlässigere Konformität mit Sicherheits- und Qualitätsanforderungen
- > Nicht toxisch, sicher in der Handhabung und umweltfreundlich
- > Vollständiger Farbumschlag statt Farbtonänderung vereinfacht die Testauswertung

## Bestellinformation

REF	Beschreibung:	Packung:
2340	TST Control Indikatoren für 134 C / 3,5 Minuten	100 Indikatoren je Packung
3727	TST Control selbstklebende Indikatoren für 134 C / 3,5 Minuten	100 Indikatoren je Packung
2342	TST Control Indikatoren 134 C / 5,3 Minuten & 121 C / 15 Min.	100 Indikatoren je Packung
2347	TST Control Indikatoren für 121 °C / 15 Minuten	100 Indikatoren je Packung
3726	TST Control selbstklebende Indikatoren für 134 C / 5,3 Min. und 121 C / 15 Min.	100 Indikatoren je Packung
3706	TST Control Indikatoren für 134°C / 18 Minuten	200 Indikatoren je Packung
5017	TST Control Duplex-Etiketten für 134 C / 3,5 Minuten	200 Indikatoren je Packung
5006	TST Control mehrenteilige „Multi-part“-Etiketten für 134°C / 3,5 Minuten	1500 Etiketten je Rolle

### STERIS OFFICES WORLDWIDE

Benelux	+32 (0)2 523 2488	Japan	+81 (0)3 5210 1521
Canada	+1 (0)905 677 0863	Latin America	+1 (0)800 884 9550
China	+86 (0)21 6137 1166	Malaysia	+60 (0)3 7954 9822
France	+33 (0)5 5693 9494	Singapore	+65 (0) 6841 7677
Germany	+49 (0)221 4661 2030	Spain	+34 (0)91 658 5920
India	+91 (0)33 2367 5150	Switzerland	+41 (0)32 376 0200
Italy	+39 (0)02 213 0341	United Kingdom	+44 (0)116 274 0600

Document # M2896DE.2014-05, Rev. A  
TPS Printed 05/2014, 1000

©2014 STERIS Corporation.  
All rights reserved. TST Control is  
a trademark of Albert Browne Ltd.

Technology to Prevent Infection and Contamination™

Manufactured in the UK. Albert Browne Ltd, Leicester LE5 1QZ



STERIS Corporation  
5960 Heisley Road  
Mentor, OH 44060-1834 ■ USA  
+1 440 354 2600 ■ +1(0)800 548 4873  
www.steris.com

STERIS  
European Headquarters  
116 Avenue de Magudas  
33185 Le Haillan  
France  
+33(0)5 5693 9494  
Email: ipt\_fr@steris.com  
www.steris.com/international



askalbert@steris.com