

EUROBRIGHT 360

FLÜSSIG SPÜLUNGSMIERMITTEL FÜR WASHMASCHINE VON CHIRURGISCHEN INSTRUMENTEN UND MEDIZINISCHES GERÄT

Eigenschaften

Reinigungsmittel für die Spülphase. Konzentrierter Reiniger für die Spülphase der mechanischen Waschanlagen von Medizinprodukten, die auch für die thermische Desinfektion vorbereitet sind. Der Dauergebrauch von EUROBRIGHT 360 fördert die Trocknung und Schmierung der Instrumente, verleiht dem medizinischen Stahl Glanz und fleckenlose Sauberkeit und schützt es vor Rost. Frei von Silikonen, neutralen pH, zusätzlich mit einem Trockenadditiv. No-Schäumen; es hinterlässt keine Spuren auf den behandelten Oberflächen. Maximale Kompatibilität mit Polysulfonen.

Chemische und physikalische Eigenschaften

Aussehen	klare Flüssigkeit
Dichte bei 20°C.	1,010
pH sol. 0,1%	6,5 ± 0,3

Zusammensetzung (reg. CE 648/2004)

Nichtionische Tenside 15-30%

Dosis und Gebrauchsanweisungen

1 - 2 ml/Liter Wasser, zusetzbar mit verschiedenen automatischen Systemen zum letzten Spülwasser. Betriebstemperatur 60 - 90°C. Vorzugsweise entmineralisiertes Wasser verwenden.

PROFESSIONELLEN GEBRAUCHT

Warnungen

Für die automatische Dosierung über Dosierpumpen befolgen Sie die gegebenen Indikationen, die vom Hersteller der Waschmaschine in Übereinstimmung der Wasserqualität und der Betriebstemperatur gegeben wurden. Darf nicht von Kindern. Nicht mit anderen Produkten mischen. Vor dem Gebrauch lesen Sie das Etikett und konsultieren Sie die Sicherheitsdatenblatt.

Gültigkeit und Lagerung

Gültigkeit: 3 Jahre, in den richtigen Bedingungen gelagert.
Lagertemperatur: 5-30°C

Eurobright 360 ist ein Klasse-I-medizinisches Gerät, erfüllt die Anforderungen der DM 93/42 / EWG und Dir. 47/2007 / EG spätere Änderungen



Euronda Spa, Via dell'Artigianato 7, 36030 Montecchio Precalcino (VI), Italy
tel.: +39 0445 329811 fax: +39 0445 865246



MONDIAL snc via Don G. Zonta, 3 – 35010 Limena PADOVA, Italy
Phone: 049768712 – fax 049769497 – www.mondialprod.it



Verpackung

FM0202 3 L. Kanistern (Kartons mit 4 Stücke)