

Systemvoraussetzungen

Hardware

- Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 oder 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 SP2
- mindestens 1 GHz (x86) bzw. 1,4 GHz (x64) Prozessor, empfohlen 2 GHz Multi-Core-Prozessor
- mindestens 1 GB RAM, empfohlen 4 GB RAM
- mindestens 7 GB freier Festplattenspeicher für die Installation
- DVD-ROM-Laufwerk oder ein USB-Speichermedium
- Internetverbindung (erforderlich für die Microsoft .NET Framework 3.5 – Installation unter Windows 8)
- Label-Printer MELAprint 60 für den Etikettendruck (optional)
- Barcode-Scanner mit Code128 Unterstützung (optional)

Software

- MELAview 3 Dokumentationssoftware
- Microsoft .NET Framework 3.5 und 4.5



HINWEIS

Es darf nur ein SQL Server 2005 oder höher auf dem Computer installiert sein.

Installation

Auf der DVD ist eine Installationsdatei enthalten, die MELAtrace und MELAview zusammen installiert.

Abhängig von der Software, die bereits auf dem Praxis-Computer vorhanden sind, werden gegebenenfalls noch folgende zusätzliche Komponenten installiert.

- Microsoft .NET Framework (wird bei der Installation von MELAview installiert, wenn noch kein .NET Framework auf dem Computer installiert ist)
- Microsoft SQL Server 2012 (wird mit MELAtrace installiert, sofern noch kein SQL Server auf dem Computer installiert ist)

Bitte beachten Sie für die Installation von MELAtrace folgende Hinweise:

- ▶ Wenn Sie ein Notebook verwenden, betreiben Sie dieses während der Installation nur mit Netzteil.
- ▶ Windows darf während der Installation nicht im abgesicherten Modus ausgeführt werden.
- ▶ Prüfen Sie, ob Sie auf dem Computer Administratorrechte haben.
- ▶ Stellen Sie während der Installation eine Internetverbindung zum Computer her.
- ▶ Schließen Sie vor der Installation alle offenen Programme.

Um die Installation von der DVD zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie die DVD in das DVD-ROM-Laufwerk ein.
2. Starten Sie die entsprechende Installationsdatei. Es öffnet sich der Installationsassistent.
3. Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
4. Folgen Sie während der Installation den Anweisungen.

Lizenzierung

Für MELAtrace und MELAview 3 ist eine Lizenzierung erforderlich. Detaillierte Hinweise zum Vorgehen finden Sie in den Installationshinweisen, die der DVD beiliegen.