

MELAG



MADE IN GERMANY



Vet

SteriHero

Mein Autoklav. Meine **Superpower**.

Ihre neue **Superpower**

Egal welche großen Aufgaben der Tag für Sie bereithält, **SteriHero Vet** hält Ihnen den Rücken frei. Denn der brandneue Stand-alone Autoklav der Klasse B und S erfüllt jetzt auch die Anforderungen als Medizinprodukt und ist perfekt auf die Veterinärmedizin abgestimmt: Von den Funktionen bis zum Preis! Zukunftsweisende Technologien, ein unglaublich fortschrittliches Display und die einzigartige MELAG Qualität - made in Germany geben Ihnen die Superpower, alles zu verändern:

Jetzt auch als
**Klasse B & S
Autoklav**



Supersicher

Sicherheit für Ihre pelzigen Patienten: Autoklaven der Klasse B und S bieten mit dem fraktioniertem Vakuumverfahren die sicherste Sterilisation Ihrer verpackten und unverpackten Instrumente - ideal abgestimmt auf die Art und Komplexität.

Dampfsterilisation der Klasse B und S gemäß EN 13060

Superstark

Mehr als genug Power für alles, was Sie vorhaben: Hohe Beladekapazitäten, kurze Zykluszeiten ab 16 min und eine effektive Vakuum-Schnelltrocknung garantieren einen kurzfristigen Wiedereinsatz Ihrer Instrumente.

Bis zu 6 kg auf 5 extra-langen Tablett



Supersmart

Das intuitive Bedienkonzept mit großem Smart-Touch Display macht alles einfach einfacher: Von der Programmwahl bis zur Dokumentation. Mit Hilfe der Prozessüberwachung erbringen Sie so den lückenlosen Nachweis einer erfolgreichen Sterilisation.

Dokumentation per USB, Netzwerk oder Protokollausdruck*

Superrobust

Ein Autoklav darf niemals ausfallen: Deshalb gehen wir bei der Qualität keine Kompromisse ein und entwickeln, produzieren und optimieren unter höchsten Qualitätsansprüchen seit 1951 an unserem Firmensitz in Berlin.

100 % Qualität - made in Germany



MADE IN GERMANY

Der treue Begleiter für Tierarzt-Praxen und -Kliniken



„Mit den MELAG Lösungen zur Instrumenten-Aufbereitung bieten wir höchsten Schutz für unsere treuen Freunde: Die Haustiere!“

Veterinärpraxis Animalogic,
Spanien



„Oberste Priorität haben unsere Patienten und deren Besitzer: Wir verlassen uns deshalb bei der Aufbereitung auf MELAG.“

AniCura Kleintierspezialisten,
Deutschland



„Die MELAG Systemlösung ermöglicht perfekte Workflows für eine zeit- und kostensparende Aufbereitung.“

Clinica Veterinaria CMV,
Italien

Schützt die Umwelt. Und Ihre pelzigen Patienten.

SteriHero Vet garantiert mit vielfältigen Programmen eine sichere Sterilisation ganz nach Ihren Bedürfnissen. Doch damit nicht genug: Das wegweisende Stand-alone Gerätekonzept und die Energiesparfunktion Power Save machen SteriHero Vet zur saubersten Lösung - für Ihr Budget und die Umwelt.

Programme SteriHero Vet 23	Universal-B	Schnell-S	Schnell-B	Schon-B	Prionen-B
Programm-Spezifikation	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	134 °C, Haltezeit: 3,5 min	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	121 °C, Haltezeit: 20,5 min	134 °C, Haltezeit: 20,5 min
Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung)*	24 – 31 min	16 – 20 min	24 – 27 min	39 – 47 min	37 – 48 min
Trocknungszeiten (zeitgesteuert)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

Programme SteriHero Vet 23 S	Universal-S	Schnell-S	Schon-S	Prionen-S
Programm-Spezifikation	134 °C, Haltezeit: 5,5 min	134 °C, Haltezeit: 3,5 min	121 °C, Haltezeit: 20,5 min	134 °C, Haltezeit: 20,5 min
Betriebszeiten (bei Minimal- bis Maximalbelastung)*	20 – 25 min	16 – 20 min	36 – 38 min	35 – 40 min
Trocknungszeiten (zeitgesteuert)	25 min	5 min	25 min	25 min

* Angaben beim Schnell-S Programm für unverpackte Beladung und bei allen anderen Programme für einfach verpackte Beladung. Zeiten können je nach Beladungsart und -menge abweichen.

Gerät / Art.-Nr.	Gerätetyp	Kesselgröße	Kesselvolumen	Beladungsmenge	Geräteabmessungen (B x H x T)	Gewicht	Stromversorgung	Dokumentationschnittstellen
SteriHero Vet 23 ME10123VB	Stand-alone Klasse B Autoklav (mit zusätzlicher Wasser-Aufbereitung kompatibel)	ø 25 cm x 45 cm lang	23 Liter	6 kg Instrumente / 2 kg Textilien	47 x 50 x 64 cm (Gerät passt auf 60 cm Tischplatte)	49 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, Netzwerk
SteriHero Vet 23 S ME10123VS	Stand-alone Klasse S Autoklav (mit zusätzlicher Wasser-Aufbereitung kompatibel)	ø 25 cm x 45 cm lang	23 Liter	5 kg Instrumente / 1 kg Textilien	47 x 50 x 64 cm (Gerät passt auf 60 cm Tischplatte)	47 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2.100 Watt)	USB, Netzwerk

Rev.0-24/0026-01.24-DE-ME



Papier sparen, Umwelt schützen:

Um Papier zu reduzieren, stellen wir Ihnen die Benutzerdokumentation elektronisch in unserem Downloadcenter bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sterihero.com

MELAG