




neodisher[®] MA Dental

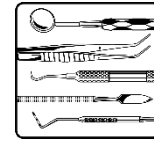

Alkalisches Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten



Pulver

Anwendungsbereich:

- Maschinelle Reinigung von Dentalinstrumenten und zahnärztlichen Utensilien wie Trays, Mundspülbecher und Nierenschalen

Leistungsspektrum:

- Gutes Reinigungs- und Emulgiervermögen für Blut- und Eiweißreste
- Schützt Instrumente und zahnärztliche Utensilien aus Edelstahl vor Korrosion
- Nicht geeignet für die maschinelle Reinigung von Übertragungsinstrumenten. Hierfür empfehlen wir das Reinigungsmittel neodisher MediClean Dental

Besondere Eigenschaften:

- Mit hohem Materialschutz
- Insbesondere für Programme mit thermischer Desinfektion geeignet

Anwendung und Dosierung:

neodisher MA Dental wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Dentalinstrumente eingesetzt. Die Dosierung erfolgt über das Türdosiergerät für Pulverreiniger und beträgt 3 g/l.

Reste von Komposite, Zahnzement und Abdruckmassen sind vor dem Aushärten von den Instrumenten zu entfernen.

Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen.

Die neodisher MA Dental-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen
- Nicht mit anderen Produkten mischen
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten

Technische Daten:

pH-Wert	11,5 (3 g/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Schüttgewicht	ca. 1.015 - 1.065 g/l
Titrierfaktor	0,54 (nach neodisher Titrieranleitung)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

< 5 % nichtionische Tenside

> 30 % Phosphate

CE-Kennzeichnung:


neodisher MA Dental erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Lagerhinweise:

Deckel nach Entnahme wieder schließen!
Produkt kann durch Feuchtigkeit verklumpen



und an Wirksamkeit verlieren. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 °C und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4113/3-2 Stand 02/2021