




neodisher® MediKlar Dental

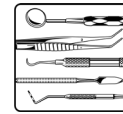

Nachspülmittel zur maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Nachspülung bei der maschinellen Aufbereitung von Dentalinstrumenten inklusive Übertragungsinstrumenten sowie zahnärztlichen Utensilien wie Trays, Mundspülbecher und Nierenschalen

Leistungsspektrum:

- Verbessert die Benetzung von Oberflächen aus Edelstahl und Kunststoff
- Beschleunigt die Trocknung bei der maschinellen Aufbereitung
- Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von neodisher MediKlar Dental wird die Biokompatibilität der behandelten Instrumente nicht beeinflusst (Biologische Beurteilung von Medizinprodukten nach EN ISO 10993-1)

Besondere Eigenschaften:

- Verkürzt die Trocknungszeit signifikant
- Neutralisiert verschleppte Alkalireste und alkalische Wässer

Anwendung und Dosierung:

neodisher MediKlar Dental wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Dentalinstrumente eingesetzt. Die Dosierung erfolgt automatisch über maschineneigene Dosiergeräte in den letzten Spülgang und beträgt 0,2 - 0,4 ml/l.

Die Dosiergeräte müssen für die Dosierung von neodisher MediKlar Dental geeignet sein.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.

- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.

Technische Daten:

pH-Wert	4,0 - 3,7 (0,2 - 0,4 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 50 mPa·s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,1 g/cm ³ (20 °C)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
 < 5 % Phosphonate
 15 - 30 % nichtionische Tenside
 außerdem Konservierungsmittel (Methylchloro-isothiazolinone/Methylisothiazolinone)


CE-Kennzeichnung:

neodisher MediKlar Dental erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.



Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4776/3-1
Stand: 05/2020