



MELAG SEAL CHECK TESTSTREIFEN, 100 STÜCK

zur Routinekontrolle gemäß ISO 11607-2

Artikelnummer: 200141

Hersteller: Melag

UVP: 65,00 €

Preis: 56,33 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Seal Check von MELAG wird zur Routinekontrolle der Qualität hergestellter Siegelnähte in der Praxis genutzt. Das durch die Medizinprodukte-Betreiberverordnung geforderte validierte Verfahren bei der Aufbereitung von Instrumenten schließt auch Routinekontrollen für Siegelgeräte mit ein. Die Teststreifen entsprechen ISO 11607-2.

Durch den Seal Check kann die Qualität der Haftung auf dem Papier durch den Kontrast auf dem speziellen Druckmuster verifiziert werden. Das vollständige Verschmelzen der inneren Folienschicht und dessen richtiger Andruck auf dem Papier führen zu einer vollflächigen Siegelnaht. Durch nicht ausreichende

Siegeltemperaturen, verschlissene Schweißschienen oder mangelnden Anpressdruck wird ein fehlerhaftes Muster sichtbar.

Arbeitsanweisung - so wird der MELAG Seal Check angewendet:

1. Schalten Sie Ihr Folienschweißgerät vor dem Test ein und warten Sie, bis die eingestellte Siegeltemperatur erreicht und das Siegelgerät betriebsbereit ist. 2. Schieben Sie den MELAG Seal Check so in eine Sterilisierverpackung, dass das graue Testfeld durch die Klarsichtfolie zu sehen ist. 3. Führen Sie die Klarsicht-Sterilisierverpackung (Folienseite oben) mit dem eingeschobenen Seal Check so in das Siegelgerät ein, dass die zu erzeugende Siegelnaht mittig über die gesamte Länge des grauen Testfeldes verläuft. Erzeugen Sie nun eine Siegelnaht, wie es bei Ihnen in der Arbeitsanweisung beschrieben ist.

Spezifikation:

Art des Artikels: Seal Check

Fachbereich:

Chirurgie; Orthopädie; Urologie; Dermatologie; Allgemeinmedizin; Dental; Gynäkologie; KfO; HNO; MKG; OP

Indikatortyp: Überprüfung Folienschweißgerät

Norm: DIN EN ISO 11607-2