



PROCARE PROTEIN CHECK

zum Nachweis eventueller Proteinrückstände

Artikelnummer: 206899

Hersteller: Miele

Preis: 150,28 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der ProCare Protein Check von Miele dient dem Nachweis und der qualitativen Einschätzung eventueller Proteinrückstände nach einem Aufbereitungsprozess mit thermischer Desinfektion. Der Test kann vielseitig eingesetzt werden, zum Beispiel in niedergelassenen Arztpraxen, ambulanten OP-Einrichtungen, Kliniken oder der zentralen und dezentralen Instrumentenaufbereitung in Krankenhäusern. Der Nachweis erfolgt durch die spezifische Bindung des Farbstoffs "Red Acid" an Protein, eine sichtbare Verfärbung zeigt hierbei eine Proteinbelastung von $> 6,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ an.

Zur Anwendung ziehen Sie die Kappe vom Teststift ab. Die Spitze des Stiftes hat eine Ventilfunktion; wird die Spitze eingedrückt, tritt Farblösung aus. Tragen Sie die Farblösung mit der Stiftspitze auf das zu prüfende Instrument auf und

lassen Sie die Lösung drei Minuten einwirken (für ein eindeutiges Ergebnis sind diese drei Minuten unbedingt erforderlich!), bevor Sie sie zwei bis drei Sekunden unter fließendem Wasser abspülen. Nun kann die zu prüfende Fläche kontrolliert werden - eine rote Verfärbung zeigt Proteinrückstände an. Besteht keine Verfärbung, kann das Instrument gründlich abgespült werden, um den Farbstoff zu entfernen. Besteht eine Verfärbung, muss das Instrument erneut gereinigt und nochmals gründlich abgespült werden.
Hinweis: Dies ist der Nachfolgeartikel zum Miele Testkit (Artikelnummer 202352).

Spezifikation:

Art des Artikels: Indikator

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Indikatortyp: Reinigungsindikator