

2 Übersicht zu den Beladungsvarianten der jeweiligen Halterungen

In der folgenden Übersicht können Sie ablesen, für welche Geräteklasse welche Halterung eingesetzt werden kann und welche Beladungsvarianten damit möglich sind. Beachten Sie unbedingt die maximalen Beladungsmengen gemäß der Bedienungsanweisung des jeweiligen Autoklaven.

| | | Art.-Nr. | | Kessellieferung | | Sterilisierbehälter | | | | | | | | | | Tupfertrömmeln | | | | Norm-Tray-Kassetten | | MELAstore Boxen ⁵⁾ | |
|---|---|--------------------|-------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| | | | | kurz | lang | 15 K | 15 M | 15 G | 17 K | 17 M | 17 G | 23 M | 23 G | 28 M | 28 G | 17 R | 23 R | 100 | 200 | | | | |
| ● | - | Halterung A | 40233 | kurz | 5 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | | |
| | | | 40244 | lang | - | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | | |
| ● | - | Halterung A "Plus" | 82620 | kurz | 5 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | | |
| | | | 82630 | lang | - | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | | |
| ● | ● | Halterung B | 40234 | kurz | 4 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | | |
| | | | 40224 | lang | - | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | | |
| - | ● | Halterung C | 40232 | kurz | 6 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | | |
| | | | 40242 | lang | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | | |
| - | ● | Halterung C "Plus" | 81370 | kurz | 6 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | | |
| | | | 81380 | lang | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | | |
| ● | ● | Halterung D | 46840 | | 4 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | | | |
| - | ● | Halterung D "Plus" | 82640 | kurz | 2+2 ¹⁾ | - | 4+2 ¹⁾ | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2+2 ¹⁾ | 2+2 ¹⁾ | 2+2 ¹⁾ | | |
| | | | 82650 | lang ²⁾ | - | 2+2 ²⁾ | 6+2 ²⁾ | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2+2 ²⁾ | 2+2 ²⁾ | 2+2 ²⁾ | | |
| - | ● | Halterung E "Plus" | 82400 | kurz | 6+2 ¹⁾ | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | | |
| | | | 82700 | lang | - | 6+2 ²⁾ | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | | |
| - | ● | Halterung F "Plus" | 82660 | kurz | 3+2 ¹⁾ | - | 6+2 ¹⁾ | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3+2 ¹⁾ | 3+2 ¹⁾ | - | | |
| | | | 82670 | lang | - | 3+2 ¹⁾ | 9+2 ²⁾ | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3+2 ¹⁾ | 3+2 ¹⁾ | - | | |

1) Diese Halterung kann zusätzlich zwei schmale Tablettis (Tiefe 27 cm) aufnehmen

2) Diese Halterung kann zusätzlich zwei schmale Tablettis (Tiefe 40 cm) aufnehmen

3) Gilt auch für Klassiker und die vorherige Euroklav-Generation

4) Gilt auch für Premium-Plus-Klasse Evolution und Premium-Klasse

5) MELAstore Boxen dürfen nur in Geräten mit fraktioniertem Vakuumverfahren verwendet werden (z.B. Premium-Plus-Klasse, Profi-Klasse).