



MELAG DECKELDICHTUNG FÜR STERILISIERBEHÄLTER 28 M / 28 G

95 cm, zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 110692

Hersteller: Melag

Preis: 41,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Deckeldichtungen sind kompatibel mit den MELAG Sterilisierbehältern. Die Sterilisierbehälter werden über die Deckeldichtung fest abgeschlossen und ermöglichen so die kontaminationsgeschützte Lagerung von Sterilgut. Sollte die Dichtung einmal aufgrund von Verschleiß, Verformung oder Verfärbung ausgewechselt werden müssen, kann dies mit der passenden Ersatzdichtung schnell und einfach selbst erledigt werden.

Wechseln Sie die Dichtung wie folgt aus: 1. Lösen Sie auf beiden Seiten die Verschlusslaschen vom Sterilisierbehälter und nehmen Sie den Deckel ab. 2. Lösen Sie mithilfe eines schmalen Gegenstandes die Dichtung aus der Deckelnut und ziehen Sie die Dichtung heraus. Achten Sie darauf, den Deckel nicht zu beschädigen. 3. Beginnen Sie beim Einsetzen der Dichtung mit den

Seitenrändern. Drücken Sie nach und nach die Dichtung in die Deckelnut.
Achten Sie darauf, die Dichtung nicht zu verdrehen.4. Setzen Sie die Dichtung
vollständig in die Deckelnut ein.

Hinweis: Die Dichtung ist länger ausgeführt, da sie durch den
Sterilisationsprozess schrumpft. Stauchen Sie die Dichtung beim Einsetzen in
die Deckelnut.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sterilisierbehälter